

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-2	Secrezione nasale	Solatrix	Immunocromatografico	Tampone		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	2 ore	qualitativo	Negativo	https://labtestsonline.it/lto-tests/test-coronavirus-covid-19.html
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-2	Secrezione nasale	Solatrix	PCR Real time	Tampone		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	24/48ore	qualitativo	Negativo	https://labtestsonline.it/lto-tests/test-coronavirus-covid-19.html
Anticorpi anti SARS-Cov-2 (N)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo rosso	2 ml	15-25°C	Il test è impiegato nella determinazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2	1	qualitativo	Non Reattivo (negativo) Reattivo (positivo)	https://labtestsonline.it/lto-tests/test-coronavirus-covid-19.html

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
Anticorpi anti SARS-Cov-2 (RBD Spike)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo rosso	2 ml	15-25°C	Il test è impiegato nella determinazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2. Rileva gli AC contro la proteina Spike bersaglio della	1	U/ml	< 0,80negativo > 0,80 positivo	https://labtestsonline.it/it-tests/test-coronavirus-covid-19.html
ACIDO URICO	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Uricasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 3,4-7,0 Donne: 2,4-5,7	https://labtestsonline.it/tests/acidourico
ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT)	Plasma, Siero	Solatrix	IFCC senza P5P	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 41 Donne: <33	https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgpt
ALBUMINA	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	35-52	https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica
ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINURIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 7	http://www.labtestsonline.it/tests/alfafetoproteina-marcatore-tumorale
AMILASI PANCREATICA	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	8-53	
AMMONIO	Sangue Intero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	ug/dL	< 75	http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 115	http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_tiroidei
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 34	

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ASPARATO AMINO TRANSFERASI (AST)	Plasma	Solatrix	IFCC senza P5P	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 40 Donne: < 32	https://labtests.online.it/tests/aspartato-amino-transferasi-astgot
AZOTO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	12-20	https://labtests.online.it/tests/azotemia
BILIRUBINA CONIUGATA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoneagente	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 0,2	https://labtests.online.it/tests/bilirubina
BILIRUBINA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoneagente	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 1,2	https://labtests.online.it/tests/bilirubina
CA 125	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 35	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-125
CA 15-3	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 28	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-15-3
CA 19-9	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 37	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-19-9

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CALCIO	Plasma	Solatrix	NM-BAPTA	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	8,6-10	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CALCIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	NM-BAPTA	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	100-300	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CEA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 5	http://www.labtestsonline.it/tests/antigenecarcinoembrionario-cea
CORO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico Indiretto	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	98-107	http://labtestsonline.it/tests/cloro
CORO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	110-250	http://labtestsonline.it/tests/cloro
COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 190*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_totale
COLTURALE	Varia	Solatrix	Microscopico, Colturale	Tampone		4°C	Specificare il distretto corporeo	6		Negativo	

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CORTISOLO	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	microg/dl	6,2-19,4	https://labtestsonline.it/tests/cortisolo
CREATINOSFOSFOCHINASI (CPK) TOTALE	Plasma	Solatrix	NAC	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 190 Donne: < 170	https://labtestsonline.it/tests/ck
CREATININA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Jaffè	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 0,7-1,2 Donne: 0,5-0,9	https://labtestsonline.it/tests/creatinina
D-DIMERO	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 500	http://www.labtestsonline.it/tests/d-dimero
ELETTROFORESI PROTEINE	Siero	Solatrix	Elettroforetico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1			http://www.labtestsonline.it/tests/immunoellettroforesi
EMOCOLTURA	Sangue Intero	Solatrix	Microscopico, Culturale	Bottiglia	40 mL	20-25°C	Prelevare e accettare 2 bottiglie aerobi e 2 anaerobi	7		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
EMOCROMO (Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Leucociti, Piastrine, MCV, MCH, MCHC, RDW,) FORMULA LEUCOCITARIA (Neutrofilii, Basofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili)	Sangue intero	Solatrix	Impedenziometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1		*	http://www.labtestsonline.it/tests/emocromo
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	Sangue intero	Solatrix	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	mmol/mol	< 48*	http://www.labtestsonline.it/tests/emoglobina_glicosilata
ESTRADIOLO17 BETA (E2)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/estrogeni
FERRITINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 30-400 Donne: 13-150	http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FERRO (SIDEREMIA)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico FerroZine senza Deproteinizzazione	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20--25°C		1	ug/dL	33-193	http://labtestsonline.it/tests/sideremia
FIBRINOGENO	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-400	http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno
FOLATI	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,5-32,2 Donne: 4,8-37,3	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico
FOLLITROPINA (FSH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		0	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/ESH
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 40-129 *Donne: 35-104	https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi_alcalina
FOSFORO	Plasma	Solatrix	Molibdato UV	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	2,5-4,5	http://labtestsonline.it/tests/fosforo

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FOSFORO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Molibdato UV	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	400-1360	http://labtestsonline.it/tests/fo-sforo
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 60 Donne: < 40	https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt
GLUCOSIO	Plasma, Siero	Solatrix	Enzimatico Esochinasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	70-99*	https://labtestsonline.it/tests/glucosio
GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (HCG) SUB UNITA' BETA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C	In gravidanza è dosabile a 8-10 gg dalla fecondazione. Picco massimo a 60-80 gg	1	mIU/mL	Non gravide: < 1 Postmenop. < 7	
HBsAB	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Siero	1 mL	4°C		3	mIU/mL	Immunità: >10	
HBSAG	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b
HCV	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
HDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: > 35 Donne: > 45*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl
HIV 1 / 2	Siero, Plasma, Sangue Intero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C	test di screening	1			http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 70-400 < 19 anni: <348	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA E (IgE) TOTALE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	UI/mL	< 200	http://www.labtestsonline.it/tests/ige-totali
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 700-1600 < 19 anni: < 1584	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 40-230 < 19 anni: < 259	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
INSULINA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	2,6-24,9	http://www.labtestsonline.it/tests/insulina

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
LATTICODEIDROGENASI (LDH)	Plasma	Solatrix	LP	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	< 250	https://labtestsonline.it/tests/LDH
LDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 115*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_ldl
LIPASI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-60	https://labtestsonline.it/tests/lipasi
LUTEOTROPINA (LH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/LH
MAGNESIO	Plasma	Solatrix	Blu di Xilidile	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	1,6-2,6	http://labtestsonline.it/tests/magnesio_mg
MAGNESIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Blu di Xilidile	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	72,9-121,5	http://labtestsonline.it/tests/magnesio_mg

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
MICROALBUMINURIA (ALBUMINA URINARIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina
OMOCISTEINA	Plasma, Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	umol/L	Anziani: < 20 Adulti: < 15 Bambini: < 10	http://www.labtestsonline.it/tests/omocisteina
PARATORMONE (PTH): molecola intera 1-84	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	15-65	http://www.labtestsonline.it/tests/PTH
POTASSIO	Plasma	Solatrix	Potenzimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	3,4-4,5**	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
POTASSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenzimetrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	25-125	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
PRO-BNP	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	4 mL	20-25°C		6	ng/L	< 125	http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e-NT-proBNP

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
PROCALCITONINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 0,5	http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina
PROGESTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone
PROLATTINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,04-15,2 Donne: 4,79-23,3	http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	mg/L	< 5	https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr
PROTEINE TOTALI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico Biureto	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	60-80	https://labtestsonline.it/tests/proteine_totali
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24h	Solatrix	Turbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	< 0,15	https://labtestsonline.it/tests/proteine-urinarie

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
PSA LIBERO	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	PSAfree/PSA: > 0,25	http://www.labtestsonline.it/ests/psa
PSA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 4,4	http://www.labtestsonline.it/ests/psa
PSEUDOCOLIN ESTERASI (CHE)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	5320-12920	
RETICOCOCCHI	Sangue intero	Solatrix	Ottico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C	Inserire nella richiesta anche l'emocromo	1	% 10*9/L	0,5-1,7 20-85	http://www.labtestsonline.it/ests/reticolociti
RICERCA DIRETTA LEGIONELLA	Urine	Solatrix	immunocromatografico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA S.PNEUMONIAE	Urine	Solatrix	immunocromatografico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO GRUPPO A		Solatrix	Immunocromatografico	Tampone		20-25°C		1		Negativo	
RICERCA TOSSINA A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	Immunocromatografico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/ests/clostridium_difficile

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
SANGUE OCCULTO	Feci	Solatrix	Fotometrico	Provetta Dedicata		20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto
SODIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	136-145	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SODIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	40-220	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SPERMIOGRAMMA	Liquido Spermatico	Solatrix	Microscopico	Contenitore Sterile	Tutto il raccolto	20-25°C	SI ESEGUE di MERCOLEDI', GIOVEDI' e VENERDI' SENZA APPUNTAMENTO; RISPETTARE MINIMO 3, MASSIMO 5 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE	1			http://www.labtestsonline.it/tests/spermiogramma
STIMA DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (e-GFR)	Plasma, Siero	Solatrix	Parametro calcolato mediante algoritmo CKD-EPI	Tappo Verde Lito Eparina		20-25°C		1	mL/min/ 1,73m ²	> 90*	http://www.labtestsonline.it/tests/egfr

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) RATIO/INR	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	INR	Terapia: 2-3	http://www.labtestsonline.it/tests/PT
TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (aPTT)	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ratio	Terapia: 2-4 Normale: 0,82-1,18	http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT
TEST DI GRAVIDANZA	Urine, Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso, Provetta Urine	1 mL	20-25°C		1			
TESTOSTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Uomini: 2,4-8,27 Donne: 0,14-0,73	http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone
TIROXINA LIBERA (FT4)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	12-22	http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina
TRANSFERRINA	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-360	https://labtestsonline.it/tests/t-ibc-uibc-e-transferrina
TRIGLICERIDI	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 180*	https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi
TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	3,1-6,8	http://www.labtestsonline.it/tests/T3

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+ da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TROPONINA T (ULTRASENSIBILE)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	< 14	http://www.labtestsonline.it/tests/troponina
UREA/AZOTEMIA	Plasma	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	10-50	https://labtestsonline.it/tests/azotemia
URINOCOLTURA	Urine	Solatrix	Microscopico, Culturale	Contenitore Sterile	10 mL	20-25°C		3		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/urocultura
VDRL	Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C		1		Negativo	
VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	Sangue intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1	mm/ora	Uomini: < 28 Donne: < 38	http://www.labtestsonline.it/tests/ves
VITAMINA B12	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	197-771	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico
VITAMINA D	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	> 30	http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d

agg
21.11.2022



MODULO
GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI
 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche

ModL 01

Rev. N. 04

DATA 24/11/2021

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
-------	---------	---------------------------	---------	-------------	-----------------	--------------------------	--	--------------------	-----------------	--	------------------

rc